

**BOSCH
+SOHN**

boso

boso TM-2450

kleiner
leichter
leiser



das neue 24-Stunden-Blutdruckmessgerät

Vorabinfo — Änderungen vorbehalten
Keine Haftung für Druckfehler

für Ihre Patienten



20,5% kleiner
22,5% leichter
33% leiser



Die Gürteltasche mit Gurt und Trageriemen wurde für ein angenehmes Tragen am Körper optimiert.

Mit gerade einmal 175 g ist das boso TM-2450 das Leichtgewicht unter den 24-Stunden-Blutdruckmessgeräten und ist mit Abmessungen von B 66 mm x H 25 mm x T 95 mm besonders klein und flach. Für bestmögliche Akzeptanz bei ihren Patienten lässt es sich leicht verstauen und bequem tragen.

Eine patientenfreundliche Schlaf Taste erlaubt die manuelle Steuerung des Schlafmodus.

für Ihre Praxis



Profitieren Sie von der einfachen Bedienung, präzisen Messung und rascher übersichtlicher Auswertung der Messdaten.

Die Abrechnungsfähigkeit über das Zusatzbudget Langzeit-RR erlaubt den wirtschaftlichen Einsatz und eine rasche Amortisation.

Bei der 24-h-Blutdruckmessung überzeugt das boso TM-2450 mit der bewährten gewohnten Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Die intuitive Bedienung ermöglicht das einfache Einstellen von individuellen Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag- und Nachtmodus über die PC-Software.

Alternativ verfügt das Gerät über ein voreingestelltes Automatikprogramm. Mit einem Knopfdruck starten Sie eine Aufzeichnung von Blutdruck und Herzfrequenz über mindestens 20 Stunden.

Die Frequenz der Blutdruckmessungen ist anpassbar und erfolgt standardmäßig in der Wachphase in Abständen von 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten.

Sie benötigen spezifischere Daten ihres Patienten? Individualisierte Intervallzeiten, Beginn und Ende von Tag- und Nachtmodus lassen sich über die Software profimanager XD am PC übersichtlich und komfortabel einstellen.

Die Messergebnisse sind durch die oszillometrische Messmethode in nahezu jeder Situation präzise.

Lieferumfang



24-Stunden-Blutdruckmessgerät
boso TM-2450

Transport-Koffer



Akku-Ladegerät

2x Akku-Sätze mit je zwei Akkus
(ein Satz bereits im Gerät eingelegt)



Manschetten für Erwachsene
- Größe M (13 x 62 | 22 – 32) abwaschbar
- Größe L (16 x 68 | 32 – 45) abwaschbar

Hüfttasche
mit abnehmbarem Trageriemen
und Gürtel



Gebrauchsanweisungen für:
- boso TM-2450
- profil-manager XD
- Wichtige Hinweise
- Akku-Ladegerät

CD-ROM
- boso profil-manager XD



USB-Verbindungskabel


Manschetten optional
S (10 x 38 | 16 – 22)
XL (17 x 76 | 36 – 50)

Geräteübersicht

Manschetten-anschlussbuchse

AUTO-Taste
Tag/Nacht-Taste


START/STOP-Taste

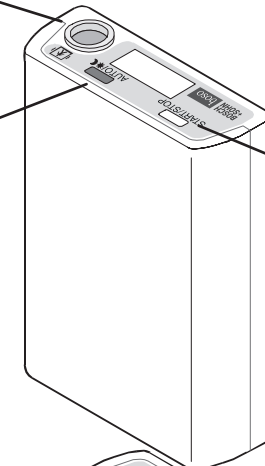

Batteriefach





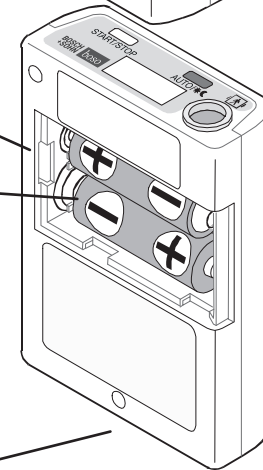





2 LR6 (AA) Akkus

Batteriefachdeckel





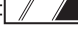

Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite




Symbole auf dem Messgerät

	START/STOP-Taste
	AUTO-Taste (TAG/NACHT-Taste)
	Automatikmodus aktiv
	Schlafmodus aktiv
<p>Batteriestatusanzeige:</p> <ol style="list-style-type: none">  1. Batterie geladen  2. Batterie teilweise geladen  3. Batterie leer, keine weitere Messung oder Datenübertragung möglich 	
	Speicher voll, 600 Messungen, keine weitere Messung möglich
	Seriennummer
	Herstellungsjahr
IP22	<p>Schutz gegen Fremdkörper und Wasser: Die IP-Klassifizierung ist die Schutzart, die von Gehäusen gemäß IEC 60529 besteht. Dieses Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12 mm und größer wie z.B. Fingern geschützt.</p> <p>Dieses Gerät ist gegen fallendes Tropfwasser geschützt, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.</p>
CE 0124	Das Gerät ist konform mit der europäischen Medizinprodukterichtlinie.

Symbole auf dem Messgerät

	Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
	Defibrillationsgeschütztes Gerät des Typs BF
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung lesen

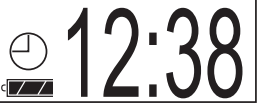OLED Display

	Anzeige der Uhrzeit, wenn nicht gemessen wird
	<p>Anzeige der Messwerte:</p> <p>SYS - Systolischer Blutdruck</p> <p>DIA - Diastolischer Blutdruck</p> <p>PUL - Puls</p> <p>mmHg - Einheit für Blutdruck</p> <p>/min - Einheit für Puls</p>
	Fehleranzeige

